

Barem de corectare



Varianta 1

concernă ocuparea post de asistent medical bsutant - Laborator analize medicale.

1. Tehnica efectuării frotiului de siupe.
Materiale necesare: lamă, lamelă, proba de cercetat.
Se aplică o picătură de siupe pe lamă iar cu o lamelă înclinată în unghi de 45° se întinde frotiul. Se usucă imediat prin agitarea lamei, apoi se colorează și se interpretează la microscop.
2. Numărătoarea leucocitelor - valori normale.

5000 - 9000/mm³

Barem de corectare
Varianta 1.



3. Dozarea creatininei - valori normale
0,6 - 1,2 mg/dl

4. Timpul de siuperare - tehnica de lucru
Se dezinfectează lobul urechii cu
alcool și se face o incizie verticală.
Șiupelul trebuie să cuprindă spunta.
Se pruește cronometrul în momentul
aparitiei primei picături de siupe.
Se culeg picăturile de siupe pe
o hirtie de filtru din 30 în 30
sec. Se notează timpul în
momentul încetării siuperării.

5. Dozarea hemoglobinei - valori
normale

- Femei - 12 - 16 mg/dl
- Bărbați - 14 - 18 mg/dl